

NOU

Surround™

PLASTURII SURROUND DE PROTECȚIE A PIELII

FĂRĂ DURERE

Plasturii **Surround™** de protecție a pielii oferă protecție completă împotriva bacteriilor și sunt rezistenți la apă. Realizați pe baza aceluiași principii ca și celelalte produse Eakin Cohesive®, aceștia formează o barieră unică cu triplă acțiune:

- 1) Absorb umezeala și o țin la distanță față de piele.
- 2) Reduc activitatea enzimelor digestive, prevenind distrugerea pielii de către acestea.
- 3) Mențin un pH natural și previn contactul agenților biologici și chimici iritanți cu pielea.

BENEFICIILE PRODUSULUI

„ După utilizarea produsului Surround am observat o îmbunătățire semnificativă a stării pielii și mai puțină durere „

- Reduce iritația pielii
- Asigură protecție completă
- Mărește confortul
- Absoarbe scurgerile
- Accelerează procesul de vindecare
- Ușor de folosit

VARIANTE DE UTILIZARE

Plasturii de protecție a pielii **Surround™** pot fi folosiți în mod eficient în mai multe situații, printre care și următoarele:

- Sondele PEG
- Tuburi de evacuare
- Cateterele suprapubiene
- Sonde Ace
- Sonde pentru traheotomie
- Catetere „pigtail”

eakin®
www.eakin.eu



„ După ce am folosit plasturii de protecție a pielii, pielea a fost foarte curată, fără iritații și au servit și drept suport pentru sonda PEG „

UȘOR DE FOLOSIT

Plasturii **Surround™** de protecție a pielii pot fi aplicați foarte ușor urmând 4 pași simpli:



Curățați și uscați zona din jur.



Îndepărtați foia de protecție din spate.



Aplicați plasturele de protecție a pielii **Surround™** pe zona afectată suprapunând cele 2 margini pentru a acoperi mai bine.




Apăsați ușor pe marginile plasturelui de protecție până când acesta este prins corect.

EXEMPLU: UTILIZAREA PLASTURELUI ÎN JURUL UNEI SONDE PEG



Înainte de a utiliza plasturele **Surround™** de protecție a pielii, pielea este excoriată și dureroasă.

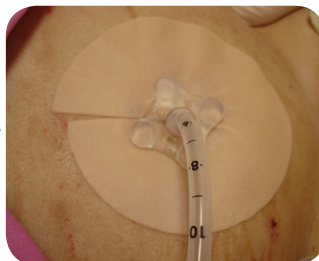

Plasturele **Surround™** de protecție a pielii acoperă zona afectată și asigură protecție completă.

Asistenta medicală a menționat faptul că plasturele "s-a lipit foarte bine de piele".

CODURILE PRODUSULUI

| | Diametru | Cantitate | Coduri produs |
|-------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| Plasture de protecție a pielii mare | 98mm | 10 | 839011 |
| Plasture de protecție a pielii mic | 48mm | 20 | 839012 |

TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

eakin[®]
www.eakin.eu

EuroMedical
Distribution Grup

www.euromedical.ro
emdgrup@gmail.com
Str. Culmea Veche, Nr. 14, Sector 3,
cod 030592, Bucharest, Romania
Telefon: 021.311.34.63